

	Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.				Niveau: DAT	
	U-Albumin				Godkendt af: DJ, HSE	
Dokumentbrugere: KBA	Redaktør: HSE	Dokumentansvarlig: HSE	Dokumentnummer: DAT 13. 2. 1.05	Version: 1.2	10.01.2022	

IUPAC-kode og navn	NPU19677 U—Albumin; massek. (proc.)= ? mg/L		
SP-kode og navn	EPC00044	Albumin;U	
Labka II-kode og navn	UALB	U-Albumin (mg/L) (version 3)	
Akkrediteret analyse			
Udførelse og svartider	Som hovedregel besvares prøven inden for 60 minutter efter modtagelsen på analyseudstyret		
Patientforberedelse	Ingen særlige forholdsregler. Hvis analyse af døgnurin ønskes henvises til databladet for: Pt(U)-Albumin (NPU19680 Pt(U)-Albumin; massehast.(proc.)= ? mg/d)		
Indikation	Mistanke om nyresygdom		
	Interne rekvirenter (BBH & FRH)	Eksterne rekvirenter	Praksis
Emballage	Gul6,5G	Gul6,5G	Gul6,5G
Prøvemateriale	Urin minimum 2 mL	Urin minimum 2 mL	Urin minimum 2 mL
Holdbarhed	7 døgn fra prøvetagning ved stuetemp.	7 døgn fra prøvetagning ved stuetemp.	7 døgn fra prøvetagning i klimaskab ved 21°C
Forsendelse	Intern transport	Region H's transportordning	Region H's transportordning
Analysessted	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling		
Enhed	mg/L		
Referenceinterval	Køn og alder	Referenceinterval	
	Alle	< 20 mg/L	
Beslutningsgrænse	Ikke relevant		
Alarm- / ringegrænse	Ikke relevant		
Måleområde	3 - 400		
Svarafgivelsesinterval	3 - 4400 (fortynding 1:11)		
Svarformat	Nedre grænse	Øvre grænse	Decimaler
	3	4400	0
	Værdier > 1000 opgives i hele tiere		0

Analysemetode	Immunturbidimetri	
Apparatur	Roche Diagnostics - Cobas 8000, c 72 modul	
Sporbarhed	Metoden er standardiseret over for referencemateriale fra IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) ERM-DA470k/IFCC	
Intern kvalitetskontrol	Biorad Liquichek Microalbumin Level 1	Biorad Liquichek Microalbumin Level 2
Kontrolniveau	27,6	49,5
Intermediær præcision (CV%)	10 %	10 %
Ekspanderet måleusikkerhed (k=2)	27,5 %	27,5 %
Ved 2 prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på 2 svar skønnet til		Ikke relevant
Ekstern kvalitetskontrol	Labquality - 3066 FI - Albumin og creatinin i urin 2 udsendelser per år i 2 niveauer	
Specificitet / interferens	Analysen er upåvirket af : <ul style="list-style-type: none"> • Ikterus (bilirubin) I-indeks < 50 mg/dL (855 µmol/L) • Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 400 mg/dL (248 µmol/L) 	
Bemærkninger	Ingen	
Reference	Roche - Metodeblad_UALB 2016-09, V 7.0	

Ændringsblad

Dato		Initialer
24-06-2020	Beslutningsgrænse tilføjet	IST
03-09-2020	Henvisning til datablad for Pt(U)-Albumin tilføjet	HSE
06-01-2022	Rettet tastefejl i referenceintervallet	HSE

Styrede dokumentudskrifter:

1 - Hjemmeside, BFH