



| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|---|
|  | Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. | | | | Niveau: Datablad |  |
| | Csv-Protein | | | | Godkendt af: DJ | |
| Dokumentbrugere: KBA | Redaktør: KB | Dokumentansvarlig: Læger | Dokumentnummer: DAT 13. 3.16.01 | Version: 1.1 | 09.02.2018 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| IUPAC kode og navn | NPU03276 Csv-Protein,massek. | | |
| LABKA II kode | CSVPROT | | |
| Akkrediteret | Nej | | |
| Udførelse og svartider | Rutine dag til dag | | |
| Patientforberedelse | Ingen | | |
| Indikation | - | | |
| | Interne rekvirenter (BBH & FRH) | Eksterne rekvirenter | Praksis |
| Emballage | Spids PS | Spids PS | - |
| Prøvemateriale | Cerebrospinalvæske | Cerebrospinalvæske | - |
| Holdbarhed | 1 time fra prøvetagning | 1 time fra prøvetagning | - |
| Forsendelse | Intern transport | Kurér | Kan ikke indsendes |
| Analysessted | Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling | | |
| Enhed | g/L | | |
| Referenceinterval | Alle | 0 d. - 1 d. | 0,40 - 1,20 |
| | Alle | 1 d. - 30 d. | 0,20 - 0,80 |
| | Alle | 1 mdr. - 13 år | 0,15 - 0,45 |
| | Alle | 14 år - 125 år | 0,15 - 0,50 |
| Beslutningsgrænse | Ikke relevant | | |
| Alarm- / ringegrænse | Ikke relevant | | |
| Svarafgivelsesinterval | 0,04-2,00 | | |
| Svarformat | Nedre grænse | Øvre grænse | Decimaler |
| | 0,04 | 2,00 | 2 |

| | | | |
|---|--|-------------|---|
| Analysemetode | Immunturbidimetri | | |
| Apparatur | Roche Diagnostics - Cobas 8000 | | |
| Sporbarhed | Metoden er standardiseret over for en primær standard, der kan spores til NIST | | |
| Intern kvalitetskontrol | BIORAD liquidcheck spinal fluid control level 1 analyseres 1 gang dagligt ved opstart og efter kalibrering | | |
| Ekstern kvalitetskontrol | Labquality Proteins in cerebrospinal fluids 3018 FI | | |
| Specificitet / interferens | Ikke relevant | | |
| Bemærkninger | Ikke relevant | | |
| Præcision | Maksimal intermediær usikkerhed (interseriel usikkerhed) | | U Δ (udvidet kombineret relativ måleusikkerhed) |
| | Værdi | CV % | CV % |
| Niveau 1 | 0,39 | 5 | Ikke relevant |
| Ved 2 prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på 2 svar skønnet til | | | Ikke relevant |

Referencer

- Roche Metodeblad_UPROT og CSVPROT
-

Ændringsblad

| Dato | | Initialer |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 2018-02-01 | Adresse på analysested slettet | TSR/DJ |
| | | |
| | | |

Styrede dokumentudskrifter:

- 1 - Gruppe B, BBH
- 1 - Hjemmeside, BFH