


 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling	Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. <b>P-PSA frit/total</b>			Niveau: <b>DAT</b>	
	Dokumentbrugere: <b>KBA</b>	Redaktør: <b>DH</b>	Dokumentansvarlig: <b>LFH</b>	Dokumentnummer: <b>DAT 13. 1.16.34</b>	
					<b>17.11.2020</b>

<b>IUPAC-kode og navn</b>	NPU09226 Prostataspecifikt antigen(P)-Prostataspecifikt antigen(frit);massefr.		
<b>SP-kode og navn</b>	EPC00009	PSA frit/total;P	
<b>Labka II-kode og navn</b>	PSARATIO	Prostataspecifikt antigen(P)—PSA frit/total	
	Anvend analysekoden PSART ved bestilling i LABKA II		
<b>Akkrediteret analyse</b>			
<b>Udførelse og svartider</b>	Som hovedregel besvares prøven inden for 60 minutter efter modtagelsen på analyseudstyret		
<b>Patientforberedelse</b>	Ingen		
<b>Indikation</b>	Mistanke om prostatacancer		
	<b>Interne rekvirenter (BBH &amp; FRH)</b>	<b>Eksterne rekvirenter</b>	<b>Praksis</b>
<b>Emballage</b>	Grøn4S	Grøn4S	Grøn4S
<b>Prøvemateriale</b>	Heparinplasma	Heparinplasma	Heparinplasma
<b>Holdbarhed</b>	24 timer fra prøvetagning ved stuetemp.	Ucentrifugeret: 24 timer fra prøvetagning ved stuetemp. Centrifugeret og afpipetteret umiddelbart efter prøvetagning: 24 timer ved stuetemp.	Ucentrifugeret: 24 timer fra prøvetagning i klimaskab ved 21°C Centrifugeret og afpipetteret umiddelbart efter prøvetagning: 24 timer i klimaskab ved 21°C
<b>Forsendelse</b>	Intern transport	Region H's transportordning	Region H's transportordning
<b>Analysested</b>	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling		
<b>Enhed</b>	-		
<b>Referenceinterval</b>	<b>Køn og alder</b>		<b>Referenceinterval</b>
	Alle: 0 år - 125 år		>20
<b>Beslutningsgrænse</b>	>0,2		
<b>Alarm- / ringegrænse</b>	Ikke relevant		
<b>Måleområde</b>	-		
<b>Svarafgivelsesinterval</b>	-		
<b>Svarformat</b>	<b>Nedre grænse</b>	<b>Øvre grænse</b>	<b>Decimaler</b>
	-	-	-

<b>Analysemetode</b>	PSARATIO = PSAFRIT / PSAT	
<b>Apparatur</b>	Roche Diagnostics - Cobas 8000	
<b>Sporbarhed</b>	Se Datablade for PSAT og PSAFRIT	
<b>Intern kvalitetskontrol</b>	Se Datablade for PSAT og PSAFRIT	
<b>Kontrolniveau</b>	-	-
<b>Intermediær præcision (CV%)</b>	-	-
<b>Ekspanderet måleusikkerhed (k=2)</b>	-	-
Ved 2 prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på 2 svar skønnet til		-
<b>Ekstern kvalitetskontrol</b>	Labquality - 3026 FI - Tumormarkører 4 udsendelser pr. år i 2 niveauer	
<b>Specificitet / interferens</b>	Se Datablade for PSAT og PSAFRIT	
<b>Bemærkninger</b>	Hvis PSAT ligger i intervallet 2-20 µg/L udløses PSAFRIT, hvorved PSARATIO kan beregnes	
<b>Reference</b>	Roche - Metodeblad_PSAT - 2017-11 V3.0 Roche - Metodeblad_PSAFRIT - 2017-12 V3.0	

### Ændringsblad

Dato		Initialer

### Styrede dokumentudskrifter:

1 - Hjemmeside, BFH